

Myt-3D Kontrollblut / Sang de contrôle Lot. B1124N

Exp.: 05.02.2025

Mythic 18

	Targets	Limits		Targets	Limits
WBC 10 ³ /ul	7.7	1.0			
LYM #	2.1	0.6	LYM %	27.5	7.0
MON #	0.7	0.6	MON %	8.5	7.0
GRA #	4.9	0.5	GRA%	64.0	6.0
RBC 10 ⁶ /ul	4.62	0.24	HGB g/dl	13.5	0.6
HCT %	38.6	2.0	MCV fl	83.5	5.0
MCH pg	29.2	2.5	MCHC	35.0	3.0
RDW %	15.5	3.0	RDWs fl	39.5	6.0
PLT 10 ³ /ul	267	40	MPV fl	7.8	3.0
PCT %	0.205	0.050	PDW %	15.0	4.0
PLCR %	12.0	6.0			

Samsung HC10

	Sollwert	Bereich		Sollwert	Bereich
LEU 10 ⁹ /l	7.4	1.0	PDWs fl	9.4	4.0
ERY 10 ⁹ /l	4.52	0.24	PDWc %	38.1	4.0
HGB g/dl	13.4	0.6	RDWs fl	65.6	6.0
HCT %	41.1	2.0	RDWc %	18.0	3.0
MCV fl	91.0	5.0	LYM	2.94	0.6
MCH pg	29.6	2.5	MON	0.64	0.6
MCHC	32.7	3	GRA	3.81	0.5
PLT 10 ⁹ /l	247	40	LYM %	39.7	7.0
PCT %	0.170	0.05	MON %	8.7	7.0
MPV fl	6.9	3.0	GRA %	51.6	6.0

Z3 CRP

	Targets	Limits		Targets	Limits
WBC 10 ³ /ul	7.66	1.0	MCH pg	30.5	2.5
LYM #	2.54	0.6	MCHC	34.1	3
MID #	0.44	0.44	RDW-CV %	17.2	3.0
GRA #	4.68	0.5	RDW-SD fl	50.5	6.0
LYM %	33.1	7.0	PLT 10 ³ /ul	259	40
MID %	5.7	5.7	MPV fl l	8.8	3.0
GRA %	61.2	6.0	PDW	16.6	4.0
RBC 10 ⁶ /ul	4.63	0.24	PCT	0.228	0.050
HGB g/dl	14.1	0.6	P-LCC	61	22
HCT %	41.3	2.0	P-LCR %	18.2	6.0
MCV fl	89.2	5.0			

Gebrauchsanweisung:

- Kontrollblut vor dem Mischen 15 Minuten bei Zimmertemperatur aufbewahren.

*Kontrollblut NIE kalt auf mechanischen Mischer legen !!
Blut nie kalt mischen!*
- Kontrollblut für ca. 30 Sek. zwischen den Handflächen hin- und herrollen und gelegentlich wenden. Kräftig mischen aber nicht schütteln!
- So lange mischen bis die roten Blutkörperchen komplett suspendiert sind. Röhrchen, welche lange gelagert wurden, müssen eventuell etwas länger gemischt werden.
- Unmittelbar vor der Messung sollte das Röhrchen 30 - 40 Mal vorsichtig gekippt werden.
- Messung durchführen.
- Deckel und Gewinde des Röhrchens reinigen.
- Kontrollblut spätestens nach 30 Minuten in den Kühlschrank zurücklegen.

Kontrollblut ist nach Öffnungsdatum 2 Wochen haltbar.

Procédure:

- Tempérer le sang de contrôle 15 minutes à température ambiante avant de le mélanger

*Prière de ne pas utiliser un mélangeur mécanique!
Ne jamais mélanger le sang de contrôle encore froid.*
- Faire rouler le tube de sang de contrôle entre les deux paumes des mains pendant environ 30 sec. puis le retourner quelques fois verticalement. Mélanger soigneusement sans secouer.
- Un sang de contrôle bien mélangé est homogène, toutes les cellules sont en suspension dans le liquide.
- Mélanger le tube plus longtemps si nécessaire.
- Exécuter l'analyse sans attendre.
- Essuyer avec un tampon les restes de sang dans le bouchon et le bord du tube.
- Remettre le sang de contrôle au réfrigérateur dans un délai de 30 minutes.

Le sang de contrôle se garde pendant 2 semaines après l'ouverture