

## WICHTIGE MITTEILUNG:

### Neues Design der R2 Reagenzien für den Z3 CRP Hämatologie-Analyzer.

Der Hersteller hat das Design der R2 Reagenzien für Ihr Z3 CRP System geändert.  
Bitte beachten Sie folgende zwei Punkte:

#### Z3 CRP R2 Reagenz

Code bisher

Der Code zum Einlesen befand sich auf dem Deckel der R2-Flasche.

Code **NEU!**

Der Code zum Einlesen befindet sich **auf dem Etikett** der R2-Flasche.

Versiegelung bisher

Die R2 Reagenzien waren unversiegelt.

Versiegelung **NEU!**

Die R2 Reagenzien sind neu oben mit **einer schwarzen Folie versiegelt.**

**WICHTIG: Diese schwarze Folie bitte nicht entfernen.**  
Das Reagenz kann mit der Folie in das Gerät eingesetzt werden.



Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen unter der Nummer **044 828 62 72** gerne zur Verfügung.

## COMMUNICATION IMPORTANTE :

### Nouveau design des réactifs R2 pour le Z3 CRP analyseur d'hématologie.

Le fabricant a modifié le design des réactifs R2 pour votre Z3 CRP. Veuillez prendre note des deux points suivants :

#### Réactif R2 pour le Z3 CRP

Code précédent

Le code pour activer le réactif R2 se trouvait sur le couvercle.

**NOUVEAU Code!**

Le code pour activer le réactif R2 **se trouve sur l'étiquette** du flacon.

Film précédent

Les réactifs R2 n'étaient pas scellés.

**NOUVEAU Film!**

Les réactifs R2 sont désormais **scellés par un film noir.**

**IMPORTANT: Ne pas enlever ce film noir.** Le réactif peut être inséré dans l'appareil avec le film.



Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au numéro **044 828 62 72**.