

## Fuji Dri-Chem

### Stabilité des paramètres en chimie clinique

|           | Paramètre                  | Stabilité dans le Serum/Plasma |      |      |
|-----------|----------------------------|--------------------------------|------|------|
|           |                            | 20-25°                         | 4-8° | -20° |
| ALB       | Albumine                   | 10w                            | 5m   | 4m   |
| ALP       | Phosphatase alcaline       | 7d                             | 7d   | 2m   |
| AMYL      | Amylase                    | 7d                             | 1m   | 12m  |
| BUN       | Urée                       | 7d                             | 7d   | 12m  |
| CA        | Calcium                    | 7d                             | 3w   | 8m   |
| CKMB      | Créatinkinase MB           | 2d                             | 7d   | 12m  |
| CPK       | Créatinkinase              | 2d                             | 7d   | 1m   |
| CRE       | Créatinine                 | 7d                             | 7d   | 3m   |
| CL        | Chlorure                   | 7d                             | 7d   | 12m  |
| CRP       | Protein C- Réactive        | 11d                            | 2m   | 36m  |
| DBIL      | Bilirubine directe         | 2d*                            | 7d*  | 6m*  |
| GGT       | Gamma-glutamyl-transférase | 7d                             | 7d   | 12m  |
| GLU       | Glucose                    | 1h/3d**                        | 7d** | 1d** |
| GOT / AST | Aspartate aminotransférase | 7d                             | 7d   | 3m   |
| GPT / ALT | Alanine aminotransférase   | 3d                             | 7d   | 7d   |
| HDL       | Cholestérol-HDL            | 3d                             | 7d   | 3m   |
| IP        | Phosphore                  | 1d                             | 4d   | 12m  |
| K         | Potassium                  | 2w                             | 2w   | 12m  |
| LDH       | Lactate déhydrogénase      | 7d                             | 4d   | 6w   |
| LIP       | Lipase                     | 7d                             | 7d   | 12m  |
| MG        | Magnesium                  | 7d                             | 7d   | 12m  |
| NA        | Sodium                     | 2w                             | 2w   | 12m  |
| TBIL      | Bilirubine totale          | 1d*                            | 7d*  | 6m*  |
| TCHOL     | Cholestérol total          | 7d                             | 7d   | 3m   |
| TG        | Triglycérides              | 2d                             | 15d  | 3m   |
| TP        | Protéines totales          | 6d                             | 1m   | 6m   |
| UA        | Acide urique               | 3d                             | 7d   | 6m   |

\*\*Garder à l'abri de la lumière

\*\*se conserve uniquement si prélevé dans tube **natriofluoré**

### Conseils généraux

Séparer le plasma / sérum du sang total lors de la conservation.

Legende:

h Heures  
d Jours  
w Semaines  
m Mois